

Lipid Control
HDL/LDL
Ready to use

REF 215



LOT 171019

QTY

1x 1ml

PARS
PEYVAND

مورد استفاده

کنترل Lipid شرکت پارس پیوند ، به صورت پودر لیوفیلیزه با منشاء سرم انسانی برای بررسی دقت و صحت Lipid در دستگاه های آنالایزر بیوشیمی می باشد.

آماده سازی

جهت آماده سازی ابتدا درب ویال حاوی پودر لیوفیلیزه را باز نموده و ICC آب مقطر دیونیزه به آن افزوده و تا حل شدن کامل پودر به آرامی تکان دهید. سپس 30 دقیقه صبر نمایید و پس از اطمینان از یکنواختی محلول ، استفاده نمایید.
- در هنگام آماده سازی ، از حرکات سریع که باعث تولید حباب در محلول می گردد ، خودداری نمایید.
- بعد از آماده سازی ، محلول را دور از نور نگهداری کنید.

پایداری

- کنترل ها تا زمان تاریخ انقضاء روی برچسب در دمای یخچال پایدار می باشند.
- پس از آماده سازی 7 روز در دمای 8-2°C و دور از نور نگهداری کنید.
- پیشنهاد می شود کنترل آماده را تقسیم کرده و در دمای منهای 20 درجه فریز کنید . در این حالت تا 30 روز دارای ماندگاری می باشد.

شرایط نگهداری

-درب ویال ها را پس از باز کردن به صورت محکم و درست ببندید تا امکان آلودگی و تبخیر را به حداقل برسانید.

محدودیت ها

- این کنترل ها با کیت های شرکت پارس پیوند مورد ارزیابی قرار گرفته اند ، پیشنهاد می شود جهت سایر کیت ها ، مناسب بودن آن ، بررسی گردد.

توجه

- کنترل Lipid پارس پیوند از سرم انسانی تهیه شده که با روش های مورد تایید FDA آزمایش شده است و فاقد مواردی چون HbsAg ، آنتی بادی Anti-HCV و آنتی بادی های Anti-HIV1&2 می باشد.
با این وجود توصیه می شود ، در حین کار با آنها به دلیل بروز عفونت های احتمالی بایستی اصول ایمنی رعایت کرد. در صورت تماس احتمالی با پوست یا چشم ، موضع را با آب فراوان شستشو دهید.
- برای جلوگیری از هر گونه آلودگی ، وسایل آزمایشگاهی تمیز و یکبار مصرف استفاده کنید.
- در هر سری ساخت ، غلظت کنترل ها متفاوت می باشد.

روش امحاء

مازاد مواد باید با رعایت قوانین امحاء و بر طبق الزامات قانونی دور ریخته شود.

مقادیر

ANALYTE	Method	Target	Units
HDL-Cholesterol	Direct	37	Mg/dL
LDL-Cholesterol	Direct	64	Mg/dL

تلفن : ۰۲۱- ۴۰۶۶۰۴۹۰ -۵ تلفن پشتیبانی فنی : ۰۲۱- ۶۶۵۹۶۳۸۸

www.parspeyvandco.com