

HbA1c Calibrator

مقدمه :

این محصول ، کالیبراتور برای اندازه گیری درصد HbA1c در خون تام با استفاده از کیت دستگاهی HbA1c شرکت پیشتازطب می باشد .

آماده سازی :

به هر ویال کالیبراتور که بصورت لیوفیلیزه می باشد ، 1 میلی لیتر (1mL) محلول لیز کننده (Pretreatment) اضافه کنید . سپس ویال را به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق قرار دهید . برای حل شدن کامل محتویات ویال ، چندین بار ویال را به آرامی وارونه کرده و به حالت اول برگردانید . هنگام سنجش HbA1c لازم است دو ساعت از زمان حل کردن کالیبراتور گذشته باشد .

پایداری :

قبل از حل شدن : تا تاریخ انقضا در دمای 8 - 2 درجه سانتی گراد
پس از حل شدن : به مدت 5 روز در دمای 8 - 2 درجه سانتی گراد

هشدارها :

- این کالیبراتور فقط برای مصرف آزمایشگاهی می باشد .
- در این کالیبراتور از خون انسان استفاده شده است . هرچند که بر اساس آزمایش های انجام شده بر روی این کالیبراتور ، مشخص گردیده است که از لحاظ anti-HIV antibodies ، anti-HCV antibodies ، HBs antigen منفی می باشد هنگام کار با این کالیبراتور لازم است با آن همانند یک نمونه عفونی برخورد کرد .

بسته بندی :

2 عدد ویال 1 میلی لیتری

Cat No: PTCCE6003

Lot No. : 1403-E

Test	HbA1c ($\mu\text{mol/L}$)	Hb ($\mu\text{mol/L}$)
HbA1c Calibrator 1	3.50	100.5
HbA1c Calibrator 2	14.20	133.5